

PERA DE IRRIGACIÓN CORYSAN



Referencia	Código Nacional	Medida	Capacidad (aprox. en c.c.)	EAN
905302	317677.4	2	35	8470003176774
905304	317669.9	4	70	8470003176699
905306	317651.4	6	120	8470003176514
905308	317644.6	8	175	8470003176448
905310	317636.1	10	240	8470003176361
905312	317628.6	12	340	8470003176286

Indicaciones:

- ▲ Irrigaciones con agua tibia en el canal auditivo para realizar una limpieza o por vía rectal para tratar el estreñimiento o limpiar los intestinos.

Contraindicaciones:

- ▲ No aplicar si hay heridas o irritaciones.
- ▲ No usar en canal auditivo si hay perforación (o sospecha) de tímpano.
- ▲ No usar en vía rectal después de cirugía intestinal, en caso de dolor de estómago, vómitos, fístulas, sangrado, perforación gastrointestinal o en caso de enfermedades como tumores en el abdomen



Descripción:

- ▲ Color azul.
- ▲ El producto está fabricado en PVC blando de grado médico.
- ▲ No contiene látex natural, Ftalatos, Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), Ácido p-hidroxibenzoico (PHB), Bisfenol-A (BPA), sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas, reprotoxicas), sustancias transmisoras de EEB (encefalopatía espongiforme bovina), ni metales pesados.
- ▲ Producto no estéril.
- ▲ Producto reutilizable en un solo usuario.

Instrucciones de uso:

- ▲ En canal auditivo:
 - Colocar la cabeza con la oreja hacia arriba.
 - Llenar la pera mediante inmersión en un recipiente con agua.
 - Colocar la punta en el canal auditivo cuidadosamente y apretar la pera varias veces hasta introducir toda el agua.
 - Mantener al paciente en la misma posición durante unos minutos.
 - Colocar la cabeza en posición erguida, sacudirla para eliminar restos de líquido y secar la oreja.
- ▲ En vía rectal:
 - Colocar al paciente en posición decúbito lateral con las rodillas dobladas.
 - Llenar la pera mediante inmersión en un recipiente con agua.
 - Introducirla cuidadosamente en el ano y apretar la pera varias veces hasta introducir toda el agua.
 - Retirar la pera del ano manteniéndola apretada.
 - Mantener al paciente en la misma posición durante unos minutos.

Desinfección y limpieza:

Antes del primer uso y después de cada uso se recomienda limpiar y desinfectar el producto como se explica a continuación:

- ▲ Limpiar la pera por el interior y exterior con agua jabonosa y enjuagar. Usar esponjas (no cepillos).
- ▲ No utilizar desinfectantes que contienen alcohol, aceites, disolventes ni ácidos. Tales desinfectantes pueden estropear el producto.
- ▲ Desinfección mediante una breve ebullición: Sumergir la pera en un recipiente lleno de agua hirviendo (máximo 3 minutos). La exposición prolongada a temperaturas superiores a 80 °C destruirá el producto.
- ▲ No apto para autoclave de esterilización con vapor.
- ▲ Apto para esterilización por gas.
- ▲ No secar en microondas.

Advertencias:

- ▲ No usar más de 60 minutos seguidos.
- ▲ No usar por vía rectal sin líquido (insuflar aire en el abdomen puede producir convulsiones).

Conservación:

- ▲ Almacenar en lugar fresco y seco.
- ▲ Mantener alejado de toda fuente de calor.
- ▲ No exponer el producto a la luz solar directa.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.