



LIMPIAR & SECAR

1

Limpiar y secar la prótesis antes de aplicar la crema adhesiva.



APLICAR

2

Aplicar la crema adhesiva en finas líneas como se muestra, o menos. Puede necesitar varias líneas para conseguir la cantidad idónea para su prótesis.



Superior



Inferior



Parcial

Tamaño máximo de cada tira

4x17mm



COLOCAR & FIJAR

3

Introducir la prótesis y sujetarla firmemente en su lugar. Si el producto rebosa fuera de la prótesis en la boca, está usando demasiada cantidad.



ENJUAGAR & RETIRAR

4

Para quitar la prótesis, enjuague la boca con agua caliente, retirar suavemente la prótesis hasta que se desprenda totalmente.

CREMA ADHESIVA para prótesis dentales completas y parciales.

IMPORTANTE:

- ✗ • NO usar más cantidad de producto de la indicada.
- ✗ • NO usar el producto más de una vez al día. Con un uso adecuado, este tubo debe durar 5 - 6 semanas para 47g y 7 - 8 semanas para 70g.
- ✗ • NO usar producto sobrante para prótesis fijadas de forma incorrecta.
- ✗ • NO usar más cantidad de la indicada. Contiene zinc, consulte a su médico si usa otros productos que contienen zinc.

¿No se siente cómodo? Por favor, consulte a su dentista regularmente para asegurar la fijación de su prótesis correctamente. Una prótesis mal fijada puede dañar su salud.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Mantener fuera del alcance de los niños. No usar en caso de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. En el caso improbable de sospecha de un problema grave con este producto, consulte a su dentista o médico e informe al fabricante y a la autoridad sanitaria nacional.

Mantener la boquilla y la tapa secas para evitar que se obstruya. Si la punta se obstruye, usar un pin para reabrirlo.

Sabor Original INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene.

Sabor Neutro INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica.

Sabor Menta Fresca INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Silica, Menthyl Lactate, Aroma, Menthol, CI 45410.

Kukident

4 SIMPLES PASSOS



LAVAR E SECAR

1

Lavar e secar a prótese antes de aplicar o creme adesivo.



APLICAR

2

Aplicar o adesivo em tiras finas como apresentado na figura, ou menos. Podem ser necessárias algumas tentativas para perceber a quantidade ideal para a sua prótese.



Em cima



Em baixo



Parcial

Comprimento máximo de cada linha **4x17mm**



COLOCAR E FIXAR

3

Colocar a prótese e pressionar firmemente durante uns instantes. Se o produto se espalhar para a boca é porque utilizou demasiada quantidade.



ENXAGUAR E REMOVER

4

Para retirar a prótese, bochechar com água morna e abanar a prótese suavemente até que esta se solte.

CREME ADESIVO para próteses dentárias completas e parciais.

IMPORTANTE:

- ✗ • NÃO usar mais produto do que o apresentado na figura.
- ✗ • NÃO usar o produto mais do que 1 vez por dia. Com a utilização adequada o tubo de 47g deve durar entre 5-6 semanas e o de 70g deve durar entre 7-8 semanas.
- ✗ • NÃO usar produto em excesso para próteses que não estejam bem ajustadas.
- ✗ • NÃO utilizar mais produto do que o indicado. Contém zinco. Consulte o médico/dentista se estiver a usar outros produtos com zinco.

Não se sente confortável? Consulte o seu dentista regularmente para se assegurar de que a sua prótese está bem ajustada. Próteses mal ajustadas podem ser prejudiciais para a sua saúde.

⚠ ATENÇÃO: Manter fora do alcance das crianças. Não usar em caso de hipersensibilidade aos ingredientes. No caso de suspeita de algum problema grave com este produto consulte o seu dentista/médico e reporte o sucedido ao fabricante e as autoridades nacionais de saúde. Mantenha a ponta aplicadora e a tampa secas para evitar que entupa. Se a ponta entupir, use um alfinete para desentupir.

Sabor Original INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, Aroma, Cl 45410, Menthol, Limonene.

Sabor Neutro INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica.

Sabor Menta Fresca INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Silica, Menthyl Lactate, Aroma, Menthol, Cl 45410.

Producto Sanitario fabricado en Alemania para / Dispositivo Médico fabricado en Alemania para

PT P&G Tech. Centres Ltd, KT13 0XP, UK

ES Distribuido por: Laboratorios Vicks, S.L., Avenida de Bruselas Nº 24, 28108 Alcobendas Madrid.

PT Distribuido por: Procter & Gamble Portugal S.A., Qta da Fonte, Ed. Álvares Cabral, 2774-527 Paço de Arcos.

EC **REP** Procter & Gamble, 65823 Schwalbach, Germany

CE
0197



Ver: 2017-11
Issue: 2017-11
90034540